






ATENÇÃO!

Não serão aceitos DLO's que apresentem FALHAS na sequência de imagens do cérebro 3D. O arquivo precisa ter todos os cinco planos do cérebro, conforme o exemplo abaixo:

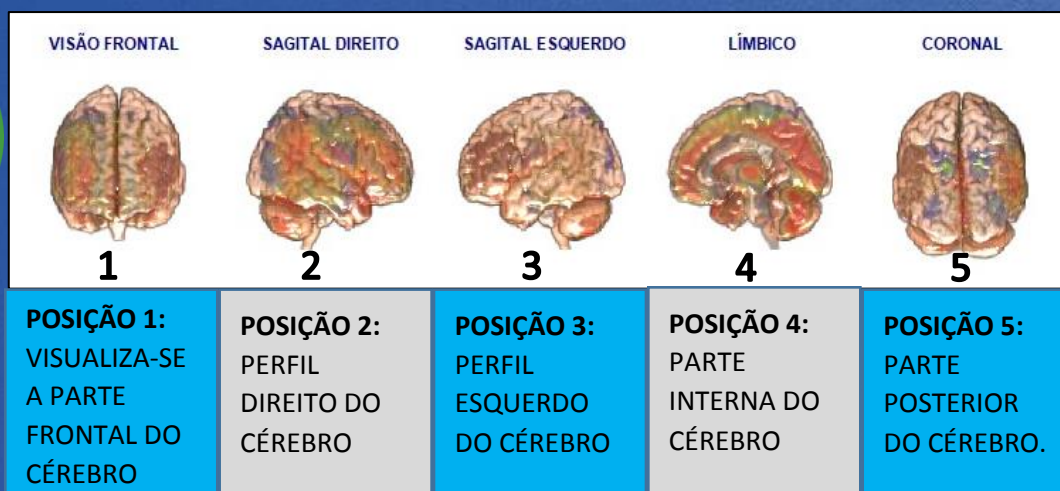

As neuroimagens são baseadas na mesma tecnologia da Ressonância Magnética Funcional (fMRI). Dessa forma, esse tipo de software exige computadores de alta capacidade de processamento de custo extremamente alto. Nossos desenvolvedores conseguiram gerar um algoritmo que exige menos desgaste de computador, sendo possível utilizar com alta fidedignidade em computadores com custo mais próximos da realidade brasileira. Veja em nosso site os requisitos mínimos testados e aprovados no INMETRO para a correta funcionalidade do sistema de Neurometria. O descumprimento das regras de uso do equipamento no computador, gera erros no processamento de imagens e gráficos, levando a repetição de imagens ou alterações de outras, conforme os exemplos abaixo:

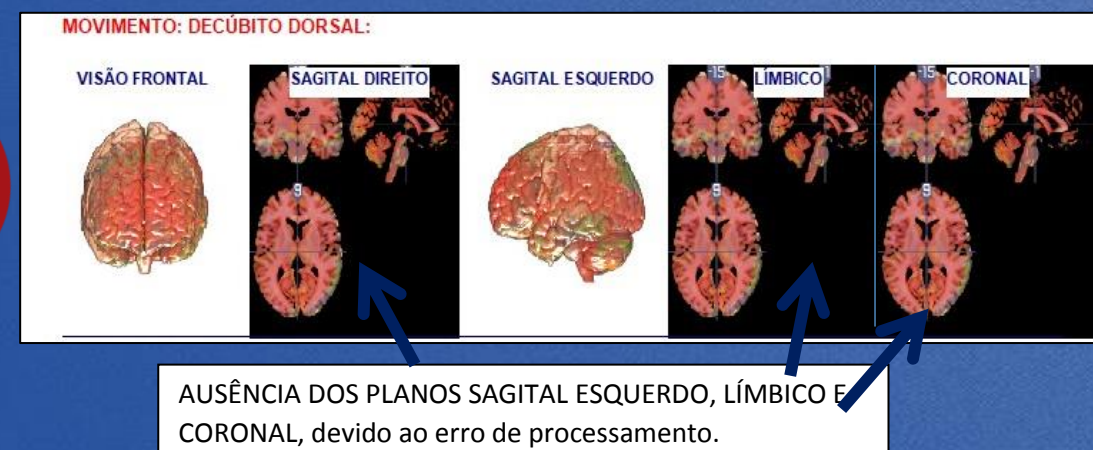

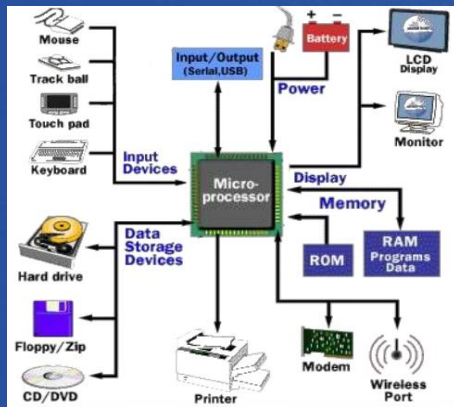

Problemas no processamento de imagens podem ocorrer devido à sobrecarga de uso do computador como memória, excesso de arquivos no HD, Conexão com Internet, Cachê em excesso, vida útil, placa de vídeo desconfigurada etc. Isso gera lentidão no software, comprometendo o processamento da imagem na posição correta, levando ao baixo desempenho do sistema e erro no registro das imagens

RECOMENDAÇÕES:



A cada 2 exames realizados deve-se reiniciar o computador, para limpar o cache.



Manter o computador em modo avião (desconectar da internet).



Fechar softwares / navegadores / Redes Sociais / Whatsappweb / Office / Gerenciadores de Emails / Programas em geral. **OBS: manter aberto somente o software de neurometria.**

Exportar os arquivos SOMENTE pelo Software no botão “EXPORTAR CONCLUSÃO”, no formato (foto), garantindo alta nitidez e boa qualidade. Não é permitido converter o arquivo.

