



REGRAS PARA O ENVIO DOS ARQUIVOS (CONCLUSÃO DLO)



- Só serão aceitos os arquivos que estiverem no formato pdf).
(só serão aceitos arquivos em pdf).
- Envie somente a conclusão do DLO.
(não será aceito o DLO completo que possui 8 PÁGINAS).
- Não serão aceitas fotos tiradas por câmeras de qualquer tipo. (Somente serão aceitos os arquivos em PDF que forem exportados direto do software).

ATENÇÃO “SOMENTE PARA EQUIPAMENTO V6”:



A RESOLUÇÃO DO SEU COMPUTADOR PRECISA ESTAR EM (1366X768). Uma resolução diferente pode alterar os arquivos.



PASSO A PASSO DE ENVIO DOS ARQUIVOS (CONCLUSÃO DLO)

COMO SALVAR A CONCLUSÃO NO FORMATO PDF?


PASSO 1: Na tela de gráficos, **CLIQUE** no botão imprimir localizado no canto inferior direito da tela.

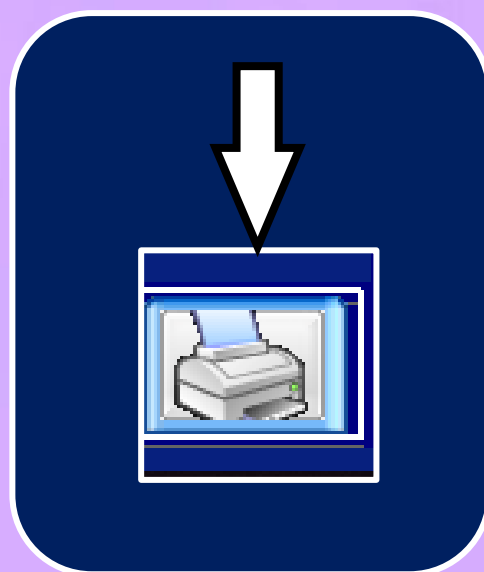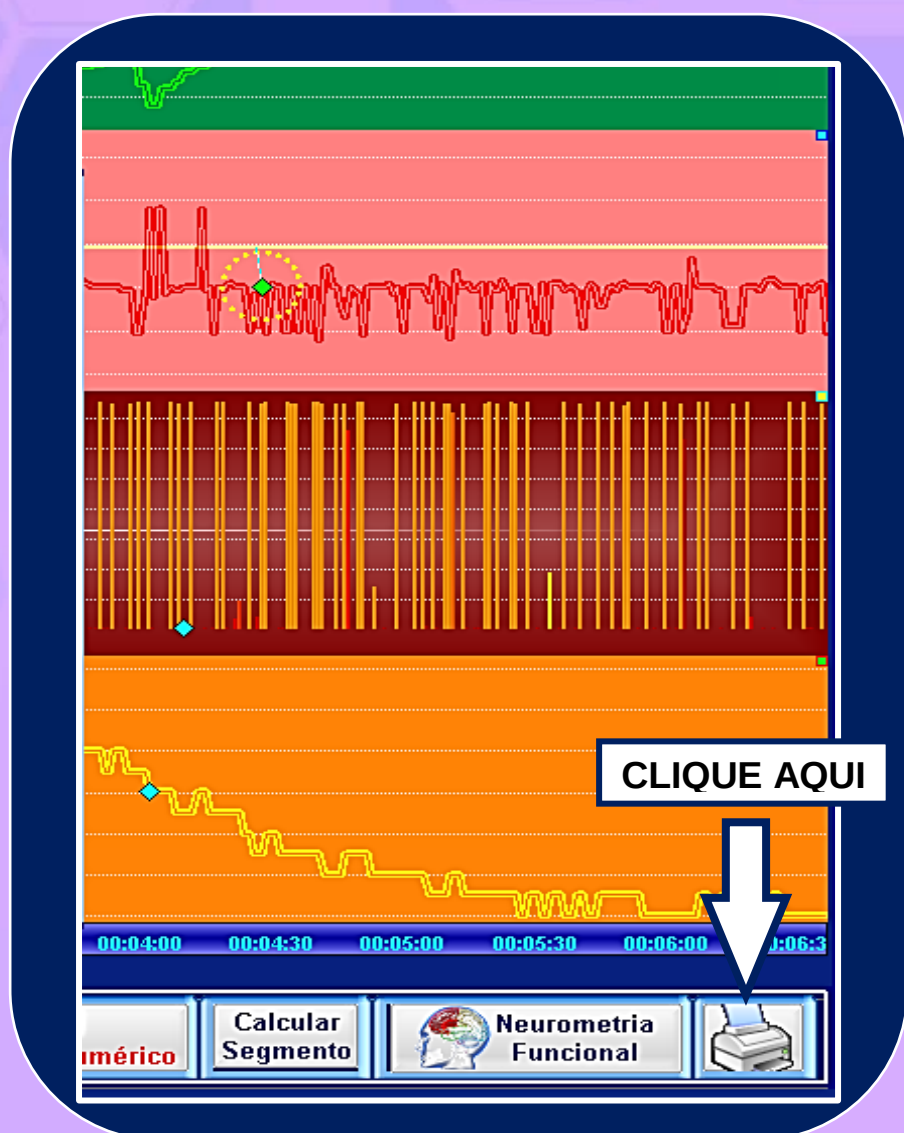



PASSO 2: Na janela “imprimir exame DLO”;

Clique no botão “**PASTA**” (localizada na parte inferior no campo “exportar análise”). Mantenha a opção PDF selecionada!

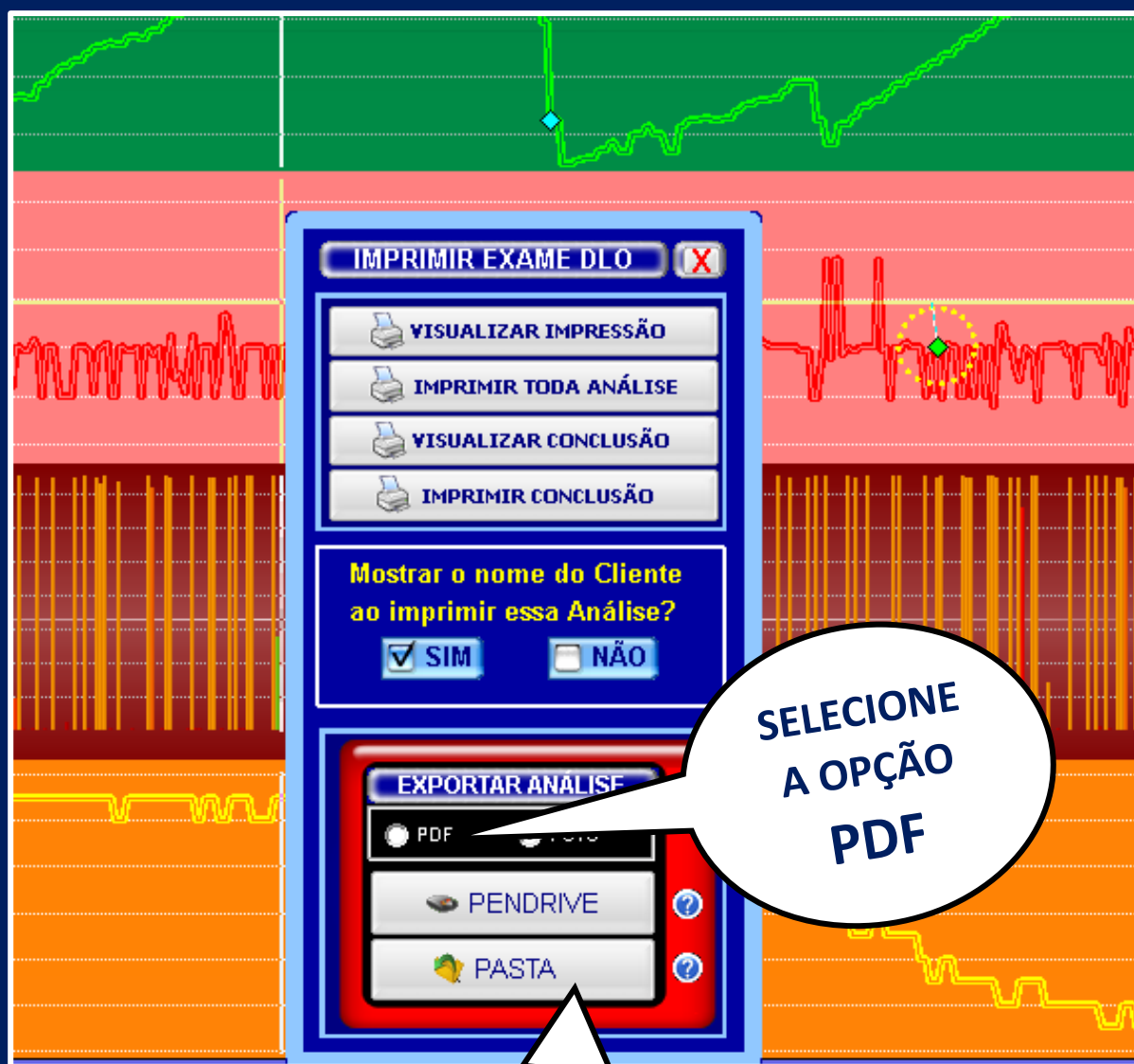

CLIQUE AQUI



PASSO 3: Na janela (o que deseja fazer?), selecione “exportar conclusão”.




Clique em “exportar conclusão”

COM ESTE PROCESSO O SOFTWARE VAI CRIAR UMA PASTA COM O NOME DO SEU PACIENTE E UMA SUBPASTA COM A DATA, ONDE OS ARQUIVOS DE CONCLUSÃO ESTARÃO ARMAZENADOS.



Pronto, o software irá salvar os arquivos “**conclusão**” e “**neurometria funcional**” na pasta do seu paciente (figura abaixo).

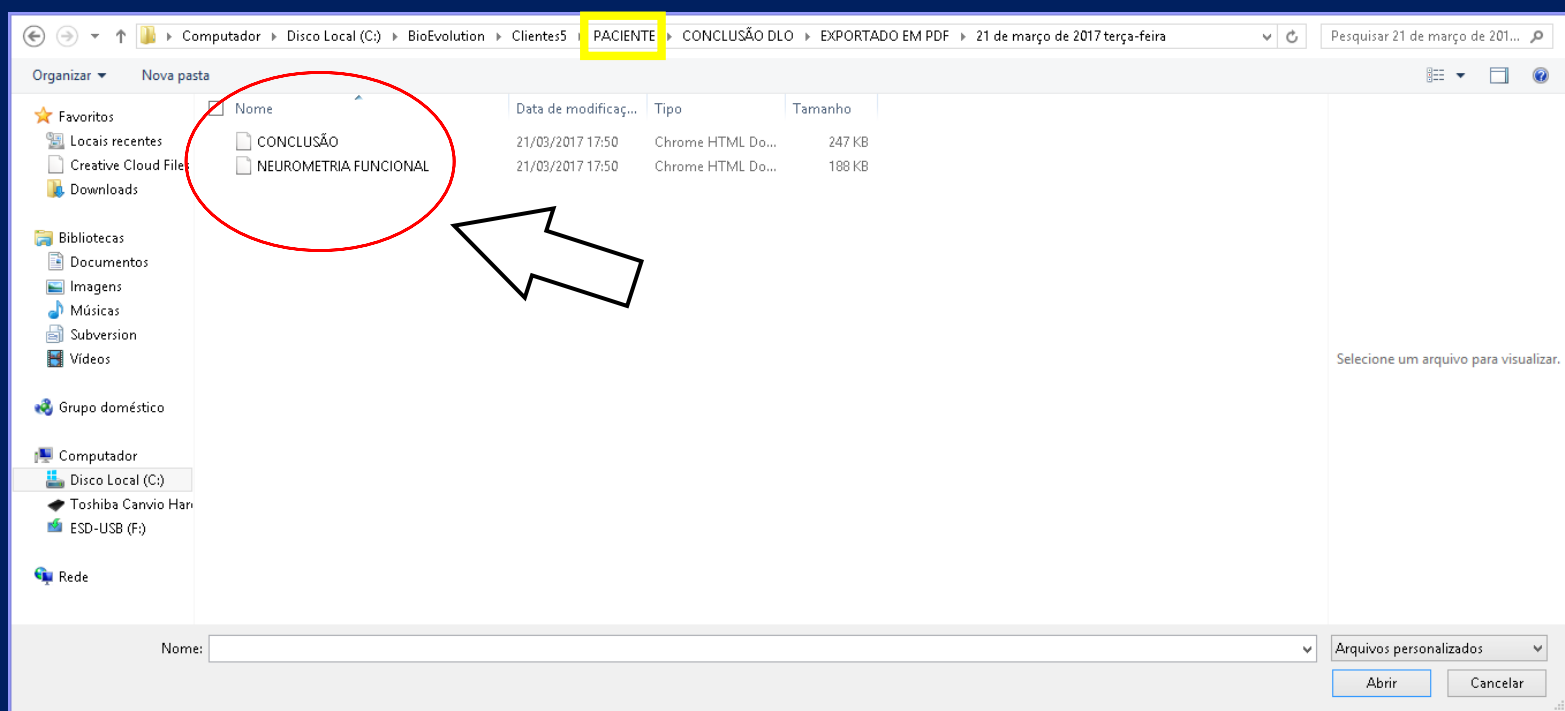


Selecione os arquivos (PDF) **CONCLUSÃO** e **NEUROMETRIA FUNCIONAL** e ANEXE UM POR VEZ na página do Trabalho de Finalização do Módulo I.




PASSO A PASSO PARA LOCALIZAR OS ARQUIVOS “CONCLUSÃO DLO”

PASSO 1: Em meu computador, clique em “disco local”.

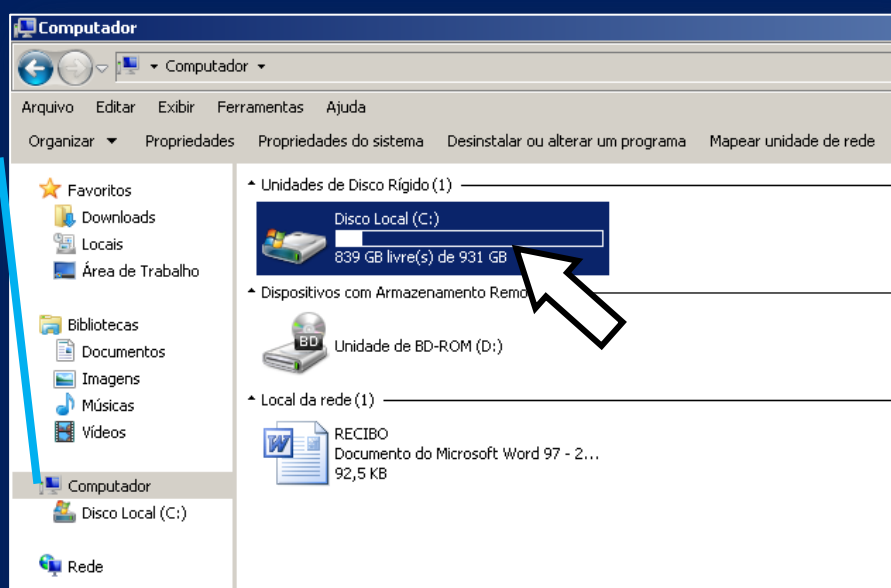


PASSO 2: Em seguida abra a pasta “Bioevolution”.

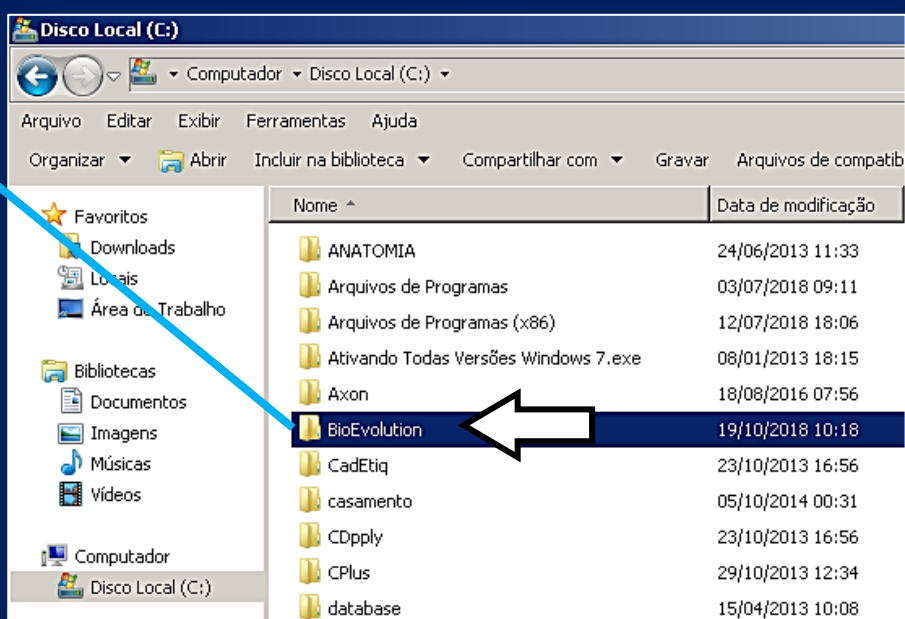




PASSO 3: Clique na subpasta “Clientes”.

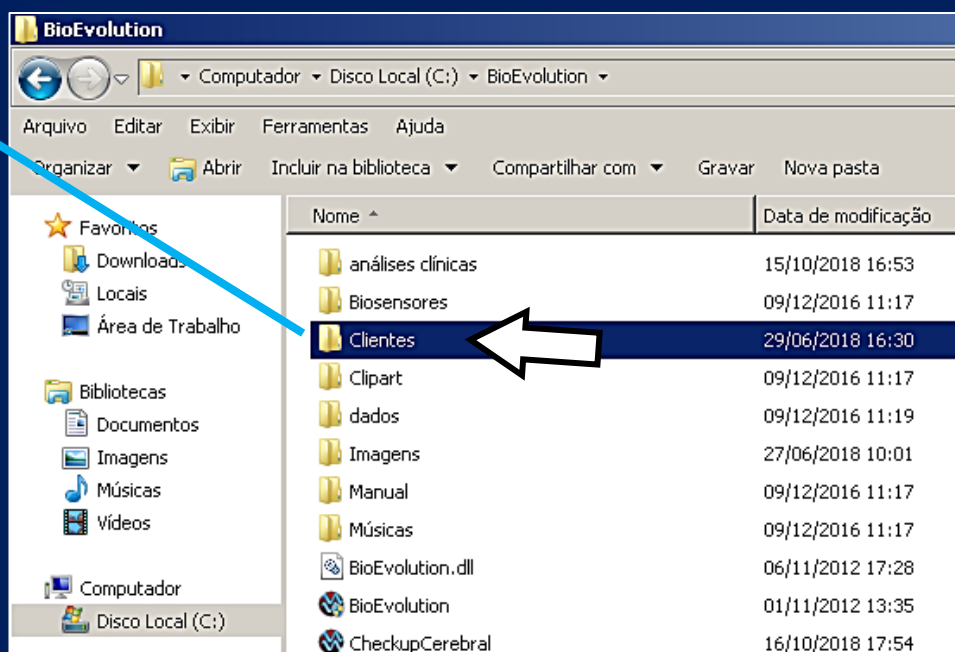


PASSO 4: Selecione a pasta com o nome do seu paciente.
(Exemplo: Paciente B).

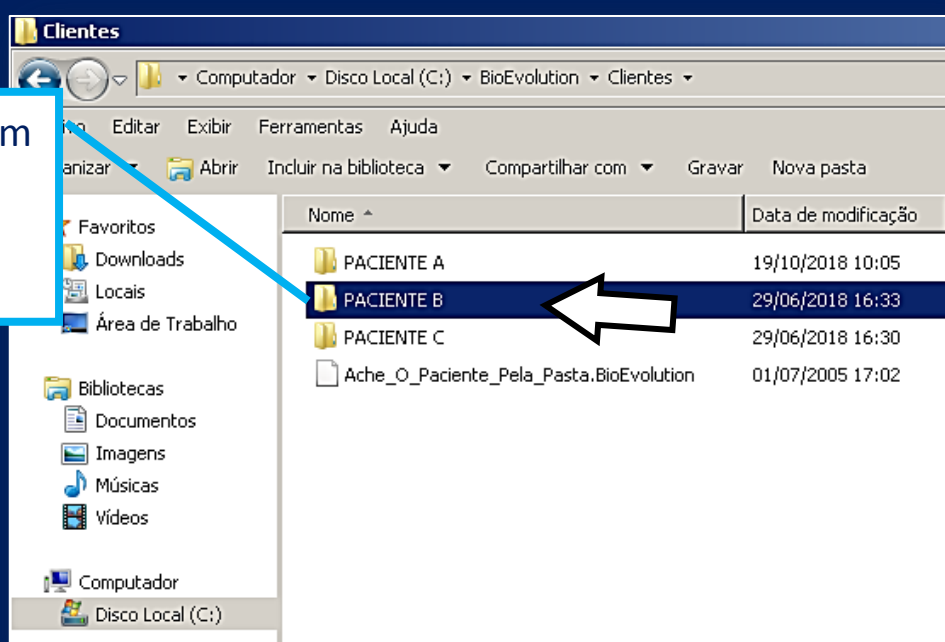




PASSO 5: Clique na pasta “conclusão DLO”.

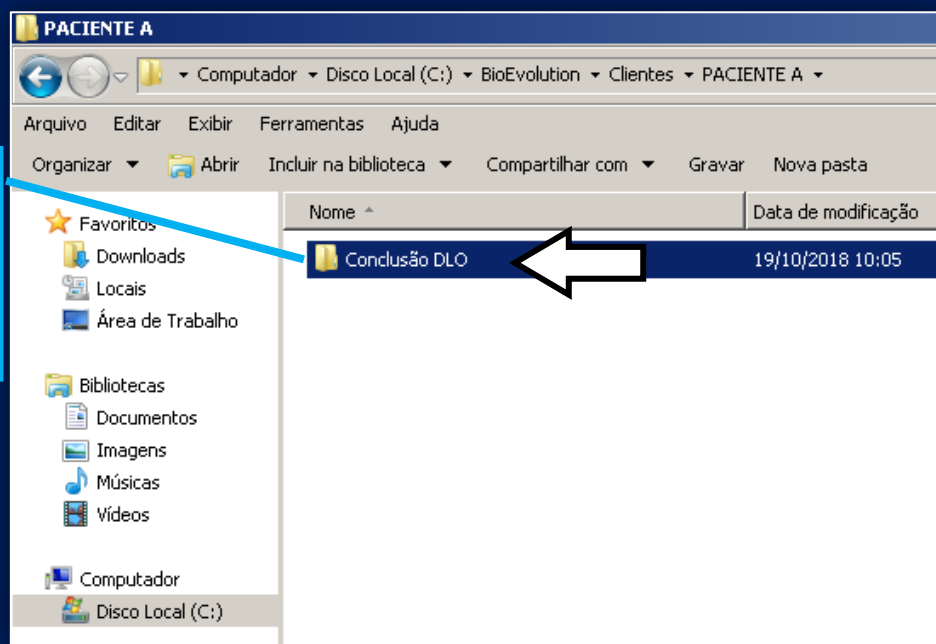


PASSO 6: Clique na pasta “Exportado em PDF Neurometria”.

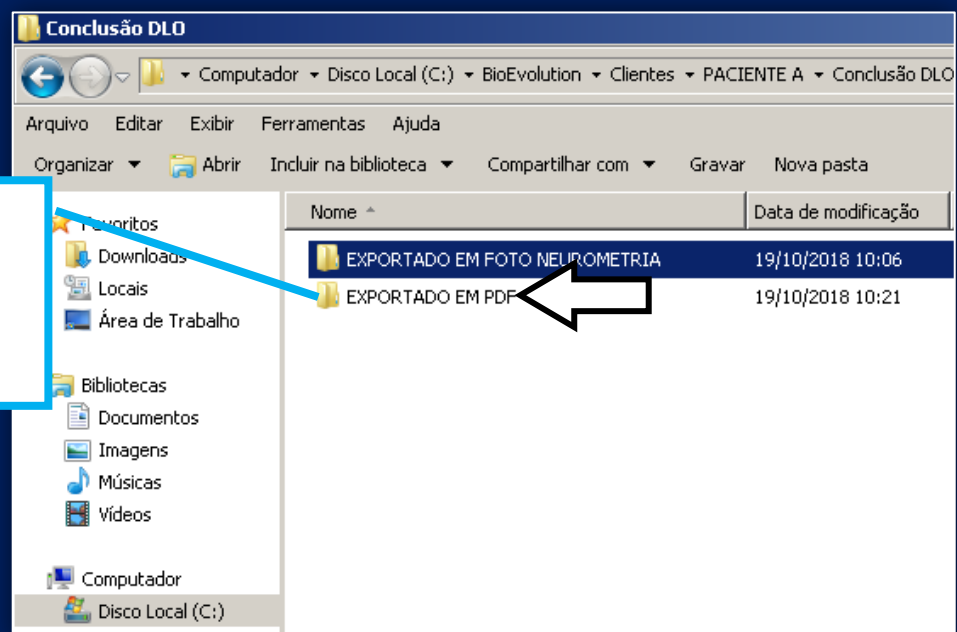




PASSO 7: Clique na pasta com a data do último DLO.

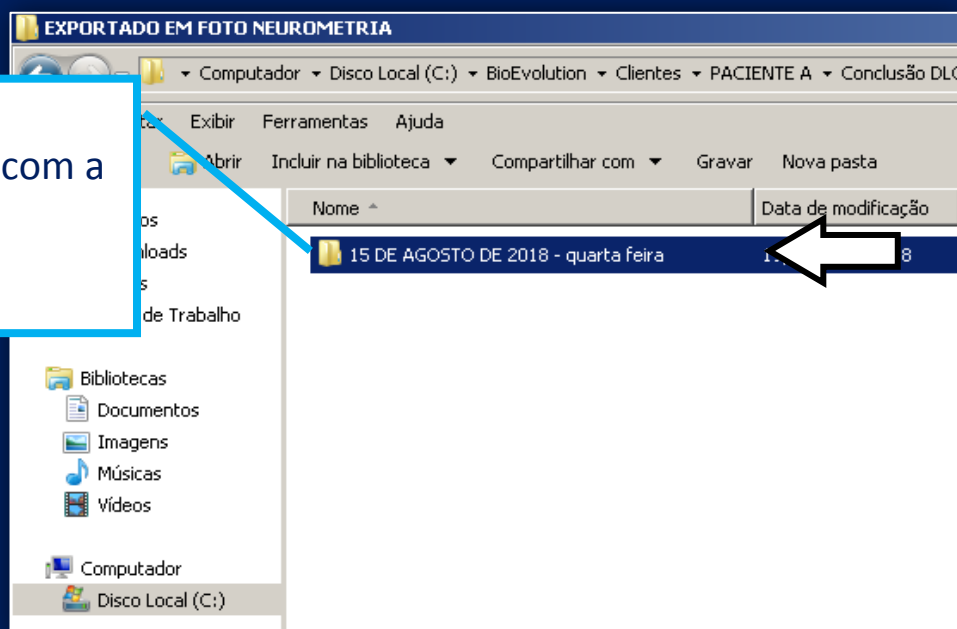

PASSO 8: Selecione os 2 arquivos: “Conclusão” e “neurometria funcional”, e envie na página de Trabalho de Finalização de módulo.

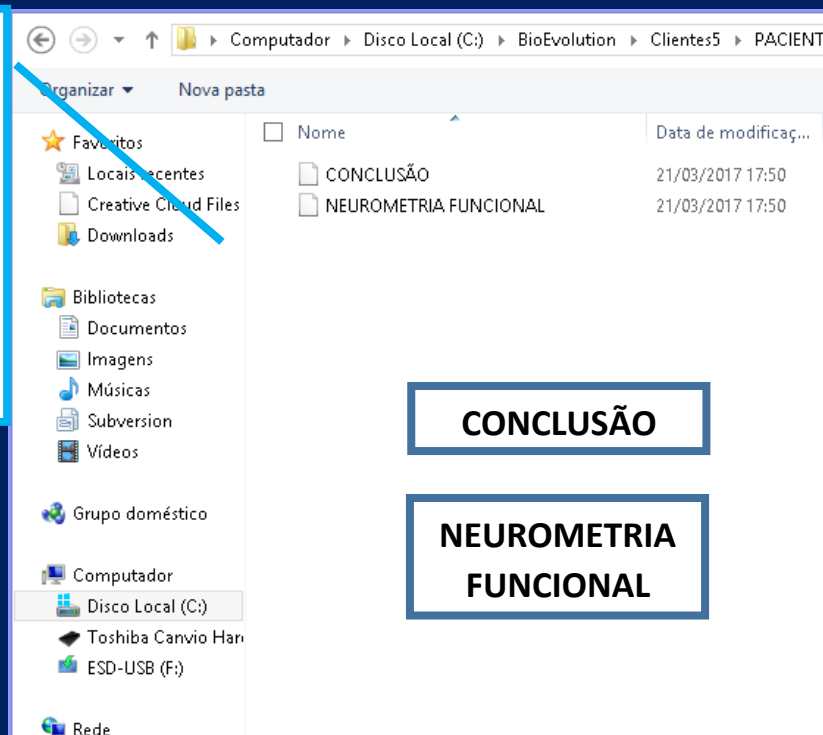



OS EXAMES PODERÃO SER NOVOS OU
JÁ REALIZADOS EM PACIENTES!



ESTAMOS À DISPOSIÇÃO!